



# Bedienungsanleitung

## ACE-2500

### Gerät aktivieren

- ▶ Ein-/Aus-Knopf drücken.
- ▶ Das Gerät fährt hoch und bringt den Sensor automatisch in Betriebsbereitschaft.
- ▶ Auf der LCD-Anzeige ist ein Countdown zu sehen, währenddem Werte zurückgesetzt und die Elektronik geprüft werden. Dies dauert für gewöhnlich 30 Sekunden, kann jedoch bis zu zwei Minuten dauern.
- ▶ Die Initialisierung des Gerätes ist beendet, wenn zwei Pieptöne zu hören sind und **WAIT** in der LCD-Anzeige verschwindet.
- ▶ Das Gerät zeigt nun: **0.00**.

### Alkoholtest durchführen

#### Atemluft einblasen

- ▶ Den Mund mittig an die Sensoröffnung heranführen.
- ▶ Mindestens vier Sekunden lang intensiv in die Sensoröffnung blasen.

#### Anzeige der Alkoholkonzentration


Alkoholkonzentration	Akustisches Signal
0.00 % bis 0.01 % BAC bzw. 0.00 bis 0.01 g/l (entspricht 0.00 bis 0.1 ‰)	Ein Piepton
0.02 % bis 0.04 % BAC bzw. 0.2 bis 0.4 g/l (entspricht 0.20 bis 0.40 ‰)	Zwei Pieptöne
0.05 % BAC bzw. 0.5 g/l und höher (entspricht 0.50 und mehr ‰)	Fünf-Sekunden-Piepton

### Bereitschaft und Abschaltung

- ▶ Das Gerät ist für einen neuen Test bereit, wenn auf der Anzeige **WAIT** verschwindet und **0.00** zu sehen ist.
- ▶ Erfolgt innerhalb von fünf Minuten kein Alkoholtest, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

### Batterieanzeige

Das Gerät zeigt die Batteriekapazität an. Eine niedrige Batteriekapazität wird mit

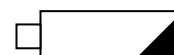

- ▶ **ACE-Tipp: Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur mit frischen Alkali Batterien.** ◀

### Um eine möglichst genaue Messung zu erhalten

- ▶ Zwischen dem Genuss des letzten alkoholischen Gerätes und dem Alkoholtest sollen mindestens 15 Minuten zeitlicher Abstand liegen.
- ▶ Im Zweifelsfall den Test zwei- bis dreimal wiederholen.
- ▶ Geschlossene, schlecht belüftete Räume sowie klimatisierte Räume verlängern die Zeit bis zu einer neuerlichen Betriebsbereitschaft des Gerätes.
- ▶ Speichel und Alkohol auf dem Sensor verlängern die Zeit bis zu einer neuerlichen Betriebsbereitschaft des Gerätes. Ist der Sensor mit Alkohol oder Speichel verunreinigt, kann das Gerät geschüttelt werden, um eine schnellere Bereitschaft für einen neuen Test zu erreichen.
- ▶ Keinen Zigarettenrauch auf den Sensor blasen. Unmittelbar nach Tabakgenuss keinen Alkoholtest durchführen.
- ▶ Das ACE AL-2500 keinen extremen Temperaturen aussetzen.
- ▶ Das ACE AL-2500 außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- ▶ Um die Genauigkeit der Messungen zu erhalten, ist alle sechs bis zwölf Monate eine Kalibrierung des ACE AL-2500 notwendig.

▶ ACE Tipp: Um die Messung und das Messergebnis zu verbessern, führen Sie (vorsichtig) einen Trinkhalm in die Sensoröffnung ein und blasen Sie die Atemluftprobe durch diesen Trinkhalm auf den Sensor.



### Wenn sich das ACE AL-2500 „aufgehängt“ hat

Ist auf der Anzeige nur die Beleuchtung zu sehen, jedoch keine Funktion feststellbar, die Batterien herausnehmen und nach einer Minute wieder einsetzen.

### Garantie

Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate, für den Fall, dass das Produkt Herstellerfehler in der Arbeitsausführung und/oder Materialfehler aufweist<sup>1</sup>. Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Der Hersteller verpflichtet sich bei einem Defekt zur Reparatur oder zum Ersatz des Gerätes<sup>2</sup>. Diese Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Gerät nicht verändert, weder boshaft beschädigt noch zweckentfremdet verwendet wurde.

### Haftungsausschluss

Weder die ACE GmbH noch eine sonstige mit Produktion und/oder Vertrieb des ACE AL-2500 befassete Rechtspersönlichkeit übernimmt die Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße oder nicht zweckmäßige Verwendung des Produktes entstanden sind. **Das ACE AL-2500 kann nicht rechtsverbindlich dazu herangezogen werden, um festzustellen, ob eine Person nach dem Genuss von Alkohol ein Fahrzeug lenken, eine Maschine bedienen oder eine sonstige Handlung, die unter Alkoholeinfluss zur Eigen- oder Fremdgefährdung führt, vornehmen kann.** Jeder Genuss von Alkohol hat negativen Einfluss auf Reaktions- und Urteilsvermögen.

<sup>1</sup> Ausgenommen Kalibrierung.

<sup>2</sup> Gegen Vorlage des Kaufbelegs.